

OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA PRUEBAS DE PATERNIDAD

1

Extraer el escobillón estéril del tubo



2

Frotar el escobillón por la cara interna de la mejilla (suavemente pero con insistencia)



3

Volver a introducir el escobillón en el tubo e identificarlo con el nombre, DNI o referencia. Conservar en la nevera o el congelador indistintamente, hasta el envío de la muestra.

4

Cumplimentar y adjuntar la siguiente documentación (pruebas con validez judicial):

- Documento de Solicitud
- Documento de Custodia de la muestra
- Fotocopia y original del DNI o pasaporte de los individuos mayores de edad
- Fotografía original reciente de los menores de edad
- Fotocopia y original del libro de familia